



GARGTEST

ZKUMAVKOVÝ FORMÁT
S ELEKTRONICKOU ŽÁDANKOU

Návod k použití kloktací
samoodběrové sady na
vyšetření přítomnosti virů
v dutině ústní a horních
cestách dýchacích, včetně
SARS-CoV-2

www.gargtest.com



Co je GARGTEST?

GARGTEST je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Byla vyvinuta výzkumníky z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a inovativními společnostmi IntellMed, s.r.o. a AUMED, a.s. Samoodběrová sada je určena k odběru vzorků, které se vyhodnocují na přítomnost virů infikujících dutinu ústní a horní cesty dýchací ve zdravotnické laboratoři. Vyhodnocení provede tato laboratoř pomocí běžně dostupných postupů na izolaci nukleových kyselin a pomocí detekce založené na amplifikaci nukleových kyselin. Virus v transportním médiu zůstává vitální a lze ho použít i pro kultivační vyšetření.

K čemu GARGTEST není určený?

1. GARGTEST neprokáže přítomnost viru na místě (při odběru), jde pouze o soupravu na samoodběr biologického materiálu, který musí být dále vyšetřen ve zdravotnické laboratoři.
2. GARGTEST není vhodný pro vyšetření bakteriální flóry, jelikož stabilizační roztok obsahuje látky potlačující růst bakterií, kvasinek a plísní.

DISTRIBUTOR: **I.T.A. - Intertact, s.r.o.**
www.ita-intertact.com
ita@ita-intertact.com
+420 224 810 196



IntellMed, s.r.o.

VÝROBCE: **IntellMed, s.r.o.**
www.intellmed.eu
sales@intellmed.eu

Proč kloktání?

1. Výplach dutiny ústní a hltanu kloktáním je velmi spolehlivý způsob samoodběru vzorku na virologické vyšetření, včetně viru SARS-CoV-2.
2. Tento nový způsob diagnostického samoodběru je funkčně srovnatelný a statisticky se neliší od odběru provedeného zdravotnickým pracovníkem výtěrovou štičičkou z nosohltanu (tzv. nasofaryngeální stěr).
3. Samoodběr kloktáním je bezpečný a jednoduchý, snadno proveditelný i poučeným laikem.
4. Při odběru není třeba asistence zdravotnického personálu.
5. Jde o zcela bezbolestný způsob odběru vzorku z hltanu a dutiny ústní, který ani při opakovaných odběrech nedráždí sliznici.
6. Odebraný vzorek je stabilizován speciálním pufrům, není třeba jej uchovávat ani převážet do laboratoře při snížené teplotě.
7. V roztoku virus zůstává dlouhodobě stabilní v širokém rozpětí teplot (od 4-37 °C) po dobu nejméně 1 týdne.

Důležité poznámky

1. GARGTEST samoodběrovou sadu nepoužívejte, pokud je poškozená nebo vypršela její expirační doba uvedená na obalu.
2. Odběrová souprava je určena výlučně k jednorázovému použití.
3. Jemný prášek na dně odběrové zkumavky obvykle vytváří tvrdou homogenní vrstvu. Rozpadnutí této vrstvy není poškozením výrobku a neovlivňuje jeho funkčnost. Prášek nevdechujte ani nepožívejte.

Samoodběrová sada GARGTEST obsahuje:



Transportní
plastová
zkumavka

**OBSAHUJE PRÁŠEK,
KTERÝ NESMÍTE
POŽÍT ANI VYSYPAT**



Jednorázová
odměrka na vodu



Návod na
použití



Hygienický trojbal:
1 x černý plastový sáček
1 x malý plastový sáček
1 x přepravní krabička
1 x absorpční vložka

Upozornění před použitím

Před použitím testu si přečtěte postup samoodběru. Ujistěte se, že na zkumavce je nalepený čárový kód s číslem. Číselný kód budete potřebovat pro registraci elektronické žádanky! Žadanku lze vyplnit pouze elektronicky na webu www.gargtest.com. Před použitím testu si dobře umyjte ruce!

Výsledek testu obdržíte SMS zprávou. Proto je nezbytné do žádanky uvést Vaše mobilní telefonní číslo. Seznam laboratoří, které vyhodnotí Váš vzorek je dostupný na www.gargtest.com.

POSTUP SAMOODBĚRU

Při samotném odběru přesně dodržujte uvedené instrukce.

1 Před provedením testu vyplňte elektronickou žádanku dostupnou na webu GARGTESTU.



2

Opatrně otevřete krabičku a vyndejte obsah. Krabičku nepoškozujte, bude použita pro zpětný transport Vašeho odebraného vzorku.



3

Napusťte vodu do přiložené odměry přesně po rysku 5 ml.



4

Zhluboka se nadechněte a zakašlejte. Tím zvýšíte pravděpodobnost zachytu infekce z dolních cest dýchacích.



5

Obsah odměry vlejte do úst - nepolykejte! Pokud omylem polknete, postup opakujte od bodu 3.




6

Kloktejte v rozmezí 20 až 30 vteřin. Kloktat můžete i přerušovaně, dodržte však min. celkovou doporučenou dobu kloktání.



7

Vykloktaný obsah úst vyplivněte zpět do odměry.

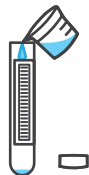


8

Vykloktaný obsah odměry opatrně přelijte do přiložené zkumavky. Ve zkumavce je stabilizační prášek, který nesmíte vysypat.




9

Zkumavku pečlivě uzavřete a protřepejte. Na štítek napište své jméno, rodné číslo, u cizinců datum narození.

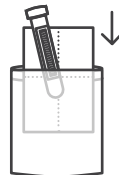


10

Uzavřenou a popsanou zkumavku vložte do nejmenšího sáčku společně s absorpční vložkou. Pak uzavřete.

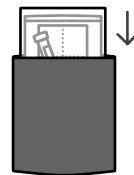

11

Takto zabalenou zkumavku vložte do největšího sáčku a uzavřete.

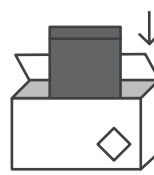

12

Zkumavku v uzavřeném vnějším sáčku vložte do nepoškozené krabičky a uzavřete. Krabičku odnešte na odběrové místo, sběrné místo, k lékaři nebo do laboratoře.

Odebraný vzorek uchovejte při teplotě 4-37 °C, je takto stabilní po dobu nejméně 1 týdne. Nevystavujte mrazu!